

Anleitung zur Entnahme einer Haarprobe



- Saubere Hände + sauberes Tier, verschmutzte Proben können nicht typisiert werden.
- Haare von anderen Tieren unbedingt vermeiden.
- Haare **gegen** die Wuchsrichtung ausrupfen.



- Für eine erfolgreiche Typisierung werden 50 – 100 Haarwurzeln werden benötigt.



- Haftfolie aufklappen.
- Haarwurzeln auf geöffnete Karte legen.



- Folie zurück klappen und Haare mit Folie abdecken.
- Rand der Haftfolie festdrücken.



- Überstehende Haare abschneiden.
- Karte mit der Papierlasche schliessen.
- TVD-Kleber auf die Haarkarte kleben und nochmals mit Ohrmarke vergleichen.



- Den vorgedruckten Barcode auf der Haarkarte unbedingt frei lassen.
- Auftrag online bei der Zuchtorganisation erfassen und das Auftragsformular ausdrucken.

Haarkarte und **Auftragsformular** in einem frankierten Briefumschlag an folgende Adresse schicken:

QUALITAS AG
Genomische Selektion
Chamerstrasse 56
6300 Zug